

Rengjøring av AeroChamber Flow-Vu



Liten maske
0-18 mån



Medium maske
1-5 år



Ungdom
5 år+



Munnstykke



Liten maske
Voksne




Stor maske


BARN OG UNGDOM

VOKSNE


Instruksjon:

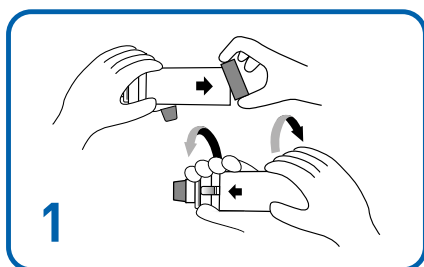


1

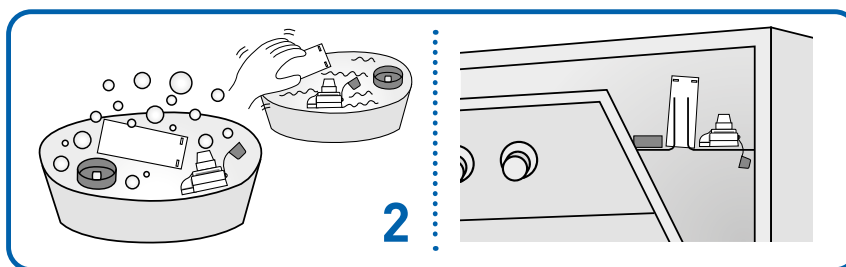

2

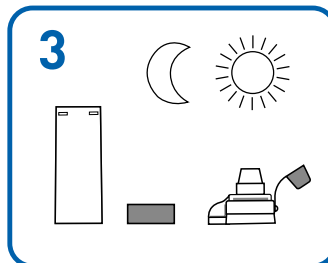

3

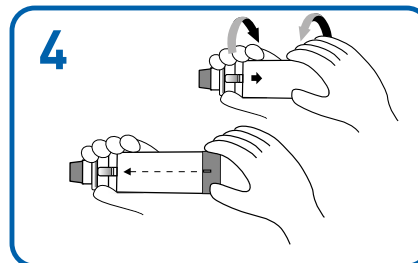

4

1. Skru opp kammeret.
2. Kan vaskes i mildt såpevann. Unngå såperester. Tåler oppvaskmaskin opptil 70°C.
3. La delene lufttørkes, må være helt tørre før bruk.
4. Skru sammen kammeret som anvist. Bakstykket sentreres med Flow Vu indikatoren.